



UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M61	Serología para hongos por inmunodifusión.	Detección de Anticuerpos tipo precipitinas por Inmunodifusión.	Suero y/o LCR, Su envío debe hacerse en tubo tapa rosca estéril o con tapa hermética estéril.	2 ml	El paciente debe estar en ayunas, se debe extraer la muestra de sangre según prácticas habituales, evitando la hemólisis. Separar el suero en condiciones de esterilidad para su envío.	Enviar el suero a temperatura entre 2 - 8°C, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B)	2 - 6 Días	Miércoles y viernes