



## UNIDAD DE MICOLOGÍA

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
M03 M07 M08 M10 M24 M26 M57	Concentración Inhibitoria Mínima sólo 1 antimicótico: (M08-anfotericina B, M24-anidulofungina, M26-caspofungina, M57-fluconazol, M10-itraconazol, M07-posaconazol, M03-voriconazol)	etest	Aislamiento del hongo	No aplica	El aislamiento del hongo debe ser viable y puro.	Cada aislamiento debe estar envuelto en papel absorbente y ser incluido en bolsa plástica asegurando su cierre, e introducir en el contenedor secundario de paredes duras, llenen los espacios libres con papel u otro material de relleno para amortiguar la muestra durante el transporte. No olvidar incluir hoja de remisión con los datos del paciente y el nombre del agente etiológico enviado. El empaque final debe llevar toda la información del remitente y del destinatario. (NORMAS IATA UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B	4 Días para levaduras y 2 semanas para hongos filamentosos	Lunes, martes y miércoles
M31	Para dos (2) antimicóticos según criterio médico							
M05	5 Para siete (7) antimicóticos							